


SISTEMA DE INMOVILIZACIÓN CERVICAL

NeX Splint™ Comenzar en paso 1

Guía de Uso


XCOLLAR™ THE CERVICAL SPLINT Comenzar paso 3

- ① Rotar pieza posterior 180° en el sentido horario

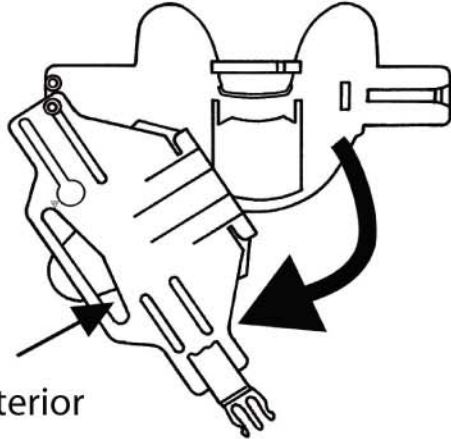

Pieza Posterior

- ② Alinee el botón con la marca del ▽ e introdúzcalo en el orificio.

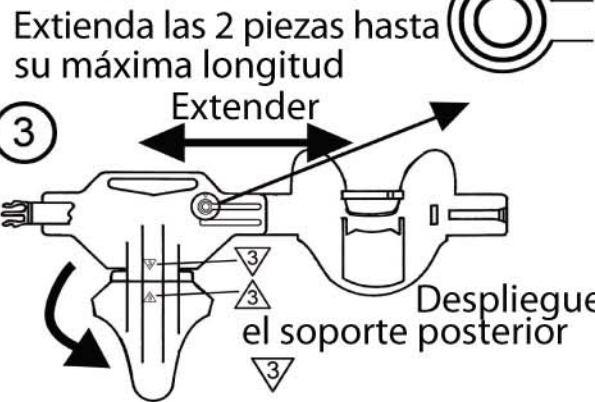


- ③ Extienda las 2 piezas hasta su máxima longitud
- Extender
- Despliegue el soporte posterior

- ④ Coloque el soporte de mentón debajo del mismo y la cinta frontal bajo el labio inferior



Coloque el seguro

- ⑤ Ajuste las cintas en ambos lados

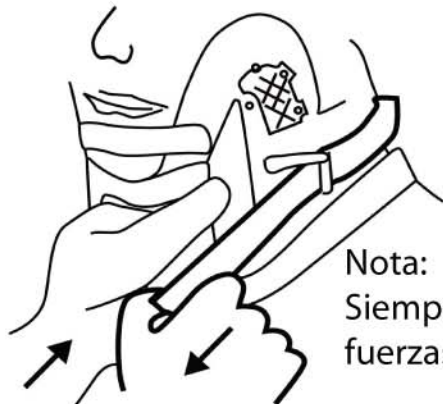

Nota:
Siempre utilice fuerzas opuestas


- ⑥ Extender el soporte de pecho hasta que quede firmemente apoyado

Aplicar los seguros



Nota:
No los extienda tirando desde los seguros

- ⑦ Extienda completamente las cintas en X y crúcelas por delante del mentón del paciente hasta cada extremo definido

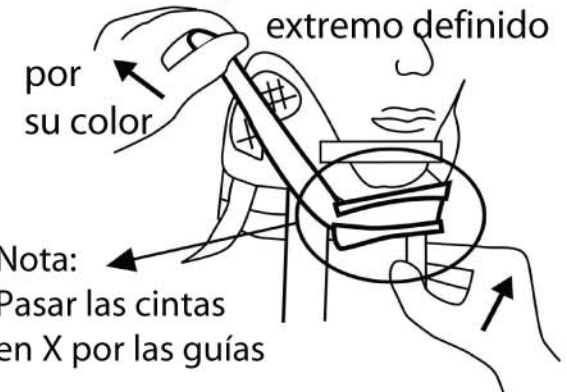

Nota:
Pasar las cintas en X por las guías

EmeGear, LLC
3196 Serena Ave.
Carpinteria, CA 93013
U.S.A.

Distribuido por:

Para nuestro curso GRATUITO visite:
www.training.xcollar.com



saginova
Nuevas ideas, nuevos productos

GARANTÍA

Emegear LLC garantiza que este producto está libre de fallos materiales y de mano de obra a través de los canales autorizados de distribución y cuando se utiliza de acuerdo a las guías de uso.

En caso de cualquier defecto Emegear LLC reemplazará el dispositivo de forma gratuita.

Made in China

ADVERTENCIA

Las instrucciones deben ser leídas y entendidas antes de su uso. En el caso de una lesión continuada seguir protocolos y/o directrices locales establecidas para cada caso.

INDICACIONES

El XCollar y su versión plegable y compacta, el NeXsplint, son dispositivos de inmovilización cervical diseñados para su aplicación temporal en el ámbito pre-hospitalario y hospitalario según directrices y/o protocolos locales.

LOT